


Vi presentiamo myONE®, il primo preservativo-perfetto al mondo con 66 taglie differenti per il massimo del comfort e del piacere.

Come si usa FitKit?




STEP 1: Stampa il tuo fit kit. Assicurati di stampare correttamente il FitKit in modo da determinare esattamente la tua misura. Per essere certi, dopo la stampa, posiziona una carta di credito nell'apposito spazio qui sotto. Se la carta si adatta allora la stampa è corretta, diversamente risolvi il problema della stampante: assicurati di stampare il documento nel formato 100% senza alcun ridimensionamento.

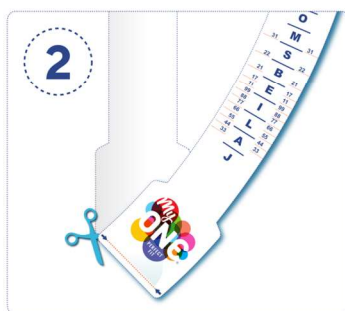

STEP 2: Ritaglia il misuratore. Le lettere indicano la lunghezza, i numeri la larghezza.



STEP 3: Trova la lunghezza. Posiziona il misuratore, con l'estremità più larga rivolta verso di te, sotto il tuo membro eretto. Assicurati che il bordo del FitKit tocchi la base del pene e che l'intera asta sia sul misuratore. La tua lunghezza è la lettera che vedi sopra la punta del tuo pene.

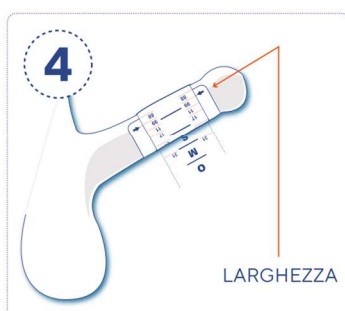

STEP 4: Trova la larghezza. Avvolgi delicatamente il misuratore al centro del membro eretto. La tua larghezza è mostrata dove le frecce incontrano i numeri. Se la misura si trova tra due numeri, scegli il numero più vicino.



STEP 5: Determina la tua taglia. Combina la lettera della tua lunghezza con il numero della tua larghezza per trovare la misura adatta del preservativo myONE. Acquista il tuo myONE su www.comodo.it

Nota: La tua misura myONE è una taglia consigliata in base alle tue misure. Potresti voler scegliere delle taglie diverse in base alle tue preferenze personali. Se la combinazione non viene visualizzata, scegli una misura simile. Il preservativo non dovrebbe essere troppo lungo o troppo corto, troppo stretto o troppo largo. La misura è corretta quando il preservativo è comodo, non stringe e non scivola via. Non aver paura di provare più di una combinazione di lettere e numeri!



	G	
	U	
	Z	
31	D	31
22	N	22
21	O	21
17	M	17
11	S	11
99	S	99
88	B	88
77	B	77
66	F	66
55	F	55

